


**!** Αφήστε το προϊόν SieloCovidAg® σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά (20°C -30°C) πριν από τη χρήση του. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μία (1) ώρα αν ανοικτεί! (Χρησιμοποιήστε γάντια και διασφαλίστε καθαρό χώρο εφαρμογής).  
Χρησιμοποιήστε αμέσως όταν η υγρασία είναι > 60%.



**#** Ανοίξτε την σφραγισμένη θήκη και αφαιρέστε την κασέτα του SieloCovidAg®, τοποθετήστε την σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.

Κρατήστε την σφραγισμένη θήκη για να απορρίψετε ασφαλώς τα υλικά εφαρμογής του τεστ.

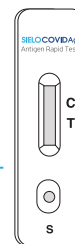

### ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΕΛΩΝ

**1** Βήχετε βαθιά δύο φορές πριν από τη συλλογή των δειγμάτων **x2**

**2** Εισαγάγετε το στυλεό λήψης σιέλου στο στόμα

**3** Στη συνέχεια, σπρώξτε μπρος-πίσω κατά μήκος της γραμμής των ούλων από το ένα άκρο στο άλλο... **x1**

**4** ...και στις δύο πλευρές του μάγουλου...

**5** ...και στο πάνω μέρος της γλώσσας 3 έως 5 φορές

**6** Αφαιρέστε το στυλεό λήψης σιέλου από το στόμα

**7** Τοποθετήστε το στυλεό λήψης σιέλου στο σωληνάριο. Αναδεύστε πλήρως κατά μήκος του τοιχώματος του σωλήνα.

**8** Σπάζτε το στυλεό λήψης σιέλου, αφήνοντας το σφουγγάρι άκρο του συλλέκτη στο θάλαμο

**9** Σφίξτε καλά το καπάκι του σωλήνα συλλογής και το υγρό ανάμιξης του θαλάμου πριν από τη χρήση. **Ανακινήστε πάνω και κάτω για περίπου 20 φορές**

**10** Ανοίξτε το κάτω βιδωτό καπάκι του φιαλιδίου εξαγωγής για να εκθέσετε το σταγονόμετρο.

**11** Μεταφέρετε 3 σταγόνες (~ 90μl) του δείγματος στο φρεάτιο δείγματος της συσκευής δοκιμής

3x (60-80μl)

**15min** Παρατηρήστε τα αποτελέσματα της δοκιμασίας μέσα σε 15~20 λεπτά. Η ανάγνωση να πραγματοποιείται με δυνατό φωτισμό. Το αποτέλεσμα είναι άκυρο σε περισσότερο από 20 λεπτά.

### ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



**ΘΕΤΙΚΟ:** Εμφανίζονται δύο ξεχωριστές γραμμές. Η μία γραμμή πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή ελέγχου (C) και η άλλη γραμμή στην περιοχή δοκιμής (T) που δηλώνει ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. Ακόμα και αν η γραμμή είναι ανή, μόλις που διακρίνεται, το αποτέλεσμα αξιολογείται ως θετικό.

**ΑΡΝΗΤΙΚΟ:** Εμφανίζεται μια γραμμή στην περιοχή ελέγχου (C). Δεν εμφανίζεται γραμμή στην περιοχή δοκιμής (T).

**ΑΚΥΡΟ:** Δεν εμφανίζονται γραμμές ή δεν εμφανίζεται η γραμμή ελέγχου (C), υποδεικνύοντας σφάλμα χρήστη ή αστοχία αντιδραστηρίου. Επληθεύστε τη διαδικασία δοκιμής και επαναλάβετε τη δοκιμή με μια νέα συσκευή SieloCovidAg®.