


ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - Lactose Intolerance quick test




DyonMed S.A.

P o i n t o f C a r e S o l u t i o n s


Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε βοήθεια : <https://dyonmedical.com/>

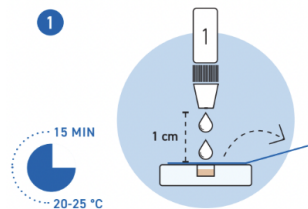


- Ανοίξετε την αυτοκόλλητη επικέτα και διπλώστε την εντελώς προς τα πίσω, όπως φαίνεται στην εικόνα (1), για να αποφύγετε τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού μεταξύ της επικέτας και των αντιδραστηρίων.
- Τοποθετήστε τη βιοψία στη θέση του φρεατίου.
- Ανακινήστε το περιεχόμενο του **Αντιδραστηρίου 1** αναστρέφοντας το φιαλίδιο. Κρατώντας το φιαλίδιο σε κατακόρυφη θέση, προσθέστε αργά δύο σταγόνες στο φρεάτιο.
- Κλείστε την επικέτα και ανακινήστε την πλάκα έντονα 6 φορές από τη μία πλευρά στην άλλη πάνω στο τραπέζι. Αφήστε να επωάσει για **15 λεπτά**.

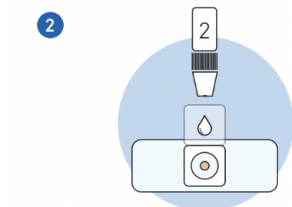

- Ανοίξετε ξανά την επικέτα. Ανακινήστε το περιεχόμενο του **Αντιδραστηρίου 2** αναστρέφοντας το φιαλίδιο. Κρατώντας το φιαλίδιο σε κατακόρυφη θέση, προσθέστε αργά μία σταγόνα στο φρεάτιο (2).

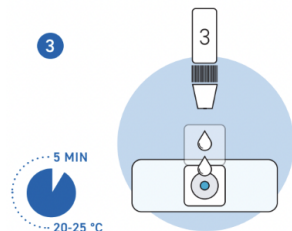

- Ανακινήστε το περιεχόμενο του **Αντιδραστηρίου 3** αναστρέφοντας το φιαλίδιο. Κρατώντας το φιαλίδιο σε κατακόρυφη θέση, προσθέστε **αμέσως** δύο σταγόνες στο φρεάτιο (3).
- Κλείστε την επικέτα και ανακινήστε την πλάκα έντονα 6 φορές από τη μία πλευρά στην άλλη πάνω στο τραπέζι. Αφήστε να επωάσει για **5 λεπτά**.

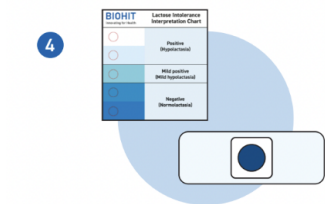

- **Αμέσως μετά** την επώαση των 5 λεπτών, ερμηνεύστε το αποτέλεσμα συγκρίνοντάς το με τον χρωματικό πίνακα (4).

Σημείωση: Αποθηκεύετε πάντα τα φιαλίδια σε κατακόρυφη θέση στους +2-8 °C. Αφήστε όλα τα αντιδραστήρια να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.

Αυτός είναι ένας ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ και δεν αντικαθιστά τις Οδηγίες Χρήσης του Lactose Intolerance quick test. Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης πριν εκτελέσετε το τεστ.

Lactose Intolerance quick test - Γρήγορος οδηγός
Έκδοση 1.0, 2024-10-16

